

SD Film Dressing

Soft, Hypoallergic Adhesive, Convenient

SD Film dressing is made of anti-bacteria and hydrophobic polyurethane film coated by PSA. It may be used on MIP wound and in fixation of catheters. PU film may keep the wound in moist environment and allows the patient take a shower and bathe.

씨큐어덤 에스디 필름 드레싱

부드럽고 투명한 필름, 저자극성 점착제를 사용한 필름 드레싱

최상급 재질의 재료사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하여 상처의 보호, I.V.고정, 카테타 고정등에 널리 사용됩니다.

Size	Qty/Box	급여 코드
4.5cm x 4.5cm	100pcs/box	K6100037
6cm x 7cm	100pcs/box	K6100137
10cm x 12cm	100pcs/box	K6100237
10cm x 25cm	50pcs/box	K6100337
15cm x 20cm	50pcs/box	K6100437
20cm x 30cm	50pcs/box	K6100537



Securederm Film Dressing



- **씨큐어덤 필름 드레싱 제품소개.**

‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 투명 필름으로서 비라텍스 재질(아크릴계)의 저알러지성 접착제를 얇은 필름에 도포한 것입니다. ‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 통기성이 좋아 산소와 수분기가 잘 통과하지만, 방수재질이므로 액체와 세균은 통과하지 못합니다. ‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 상처부위를 외부의 오염물질로부터 보호해 주는 제품입니다.

- **씨큐어덤 필름 드레싱 사용 용도.**

‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 카테터 부위 및 상처부위를 감싸 보호하고, 상처 치유를 위한 습윤 환경을 유지하기 위해 사용됩니다. 또한 2차 드레싱으로 사용되며, 피부를 위험으로부터 보호하기 위해서 사용됩니다.

의료기구를 피부에 고정시키고, 눈을 보호하기 위해 사용되기도 합니다. ‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 상처부위에 습윤환경을 조성함으로써 자기분해적 이물질 제거(autolytic debridement)를 촉진할 수도 있다. 테가덤의 주요 용도는 다음과 같습니다.

- IV 카테터
- 기타 IV 카테터와 피부를 관통하는 의료기구
- 깨끗하고 비개방적인 수술 절개부위
- 피부이식 부위
- I, II 단계 욕창
- 거즈, 알지네이트(alginates), 하이드로젤(hydrogel) 위에 2차 드레싱으로서
- 찰과상, 터진 피부, 물집
- 1도 및 2도 화상
- 벗겨진 피부, 수분에 지속적으로 노출되는 피부
- 수술시 눈을 보호하거나, 각막찰과상 환자를 위하여
- PCA 시술시
- PTBD 시술시

● 사용예외

1. 감염된 카테터 및 상처 부위에는 사용할 수 없습니다..
2. 상처를 봉합하는 등의 1차 처치수단을 대체할 수 없습니다..

● 주의사항

1. 드레싱을 하기 전에 카테터 부위를 지혈해야 합니다..
2. 드레싱을 하는 동안 ‘씨큐어덤 필름 드레싱’을 당기지 않도록 합니다. 드레싱을 팽팽하게 당겨 적용하면 피부에 물리적 외상이 생길 수 있습니다.
3. 피부자극을 피하고 드레싱이 잘 부착되도록 하기 위해, 피부를 건조시키고 비누 찌꺼기 등을 남기지 않습니다.
4. ‘씨큐어덤 필름 드레싱’은 감마선이나 EO Gas 등으로 재소독, 재사용 하면안됩니다.

● 사용방법

1. 드레싱 선택 - 카테터 및 상처 주변의 건조하고 건강한 피부에 접착될 수 있도록 2cm 정도의 여유를 갖는 드레싱 사이즈를 선택합니다.
2. 적용부위의 처치
 - A. 통상적 치료 원칙(institution protocol)에 따라 적용부위를 처치합니다.
 - B. 적용부위의 털을 깎으면 드레싱의 부착이 개선되지만 면도는 권장되지 않습니다.
 - C. 피부자극을 방지하고 부착이 잘 되도록 하기 위해, 드레싱을 하기 전에 모든 약품을 완전히 건조시킵니다.
3. 적용방법

- A. 포장을 열고 멸균된 드레싱을 꺼냅니다.
- B. 덮개를 벗겨 접착면을 노출시킵니다.
- C. 드레싱을 적용부위의 중앙에 위치시킵니다.
- D. 드레싱의 모서리를 살짝 누르면서 테두리를 서서히 떼어냅니다.
- E. 드레싱의 중앙부로부터 주변부 방향으로 눌러 드레싱을 단단히 접착시킵니다.
- F. 드레싱에 달려 있는 라벨에 정보를 기록하고 드레싱 주변에 붙여 둡니다.

● 사후조치

1. 감염 및 기타 합병증을 확인하기 위해 드레싱 부위를 매일 관찰합니다. 감염이 의심되면 드레싱을 제거하고 해당 부위를 직접 확인하여, 적절한 의학적 치료를 받습니다. 감염의 징후가 열, 통증, 발적, 부종, 특이한 냄새, 자극 등으로 나타날 수도 있습니다.
2. 통상적 치료원칙에 따라, 또는 ‘씨큐어덤 필름 드레싱’의 보호장벽 기능이 손상되었을 때 - 예컨대 드레싱이 느슨하거나 봉합사 등에 의하여 드레싱에 구멍이 뚫렸을 때 - 드레싱을 교체합니다.

● 제거

가장자리 부분을 살며시 잡고 털이 자라는 방향으로 드레싱을 서서히 떼어낸다. 이때 드레싱을 위로 당기지 않고 꺾질을 벗기듯이 뒤로 당기면 피부에 외상을 입을 수 있습니다..

IV 카테터나 기타 의료기구로부터 ‘씨큐어덤 필름 드레싱’을 제거할 때는 드레싱의 한 쪽 끝을 잡고 팽팽히 당겨 떼어냅니다.

드레싱 제거를 위해 의료용 솔벤트가 사용될 수도 있습니다.

드레싱을 제거할 때 카테터 등의 의료기구가 떨어지거나 상처면이 손상되지 않도록 피부와 카테터를 잘 받쳐줍니다.

상피화(epithelization)가 일어나 드레싱이 상처면에 달라붙은 경우 살짝 물로 적셔줍니다.