

SD Film Roll

Soft, Hypoallergic Adhesive, Convenient


Securederm SD Film Roll is made of anti-bacteria and hydrophobic polyurethane film coated by PSA. It may be used on MIP wound and in fixation of catheters. PU film may keep the wound in moist environment and allows the patient take a shower and bathe.

씨큐어덤 에스디 필름 롤

부드럽고 투명한 필름, 저자극성 점착제를 사용한 필름 롤

최상급 재질의 재료사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알러지반응을 최소화 하여 상처의 보호, I.V.고정, 카테타 고정등에 널리 사용됩니다.

Size	Qty/Box
5cm x 10m	1Roll/box
10cm x 10m	1Roll/box
15cm x 10m	1Roll/box

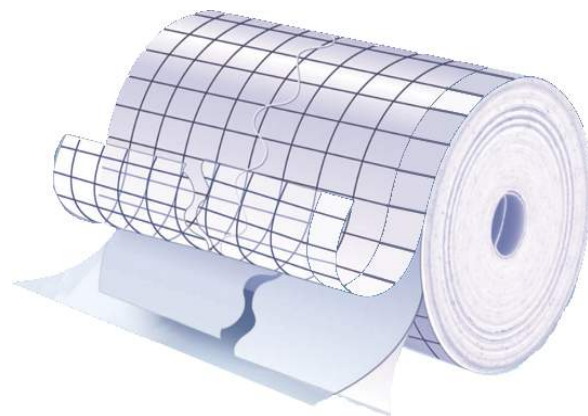

건강보험심사평가원 비급여 치료재료 코드

BM5109VJ, 전규격

주식회사 제노메디칼
 경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
 T: 070-7579-1244
 F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>

Securederm Film Roll 용 도 설 명 서


● 제품설명

Securederm Film Roll은 외과, 정형외과, 흉부외과, 산부인과, 비뇨기과, 신경외과 등 다양한 과에서 수술 후 상처 부위에 사용하는 접착성 드레싱 제품으로 상처부위를 보호하고 감염을 예방하는 제품입니다.

제품의 특징

1. 상처 보호 및 감염 예방 (Waterproof and Prevent Infection)

우수한 방수력으로 수분이 있는 환경에서도 물이 스며들지 않게 하여 박테리아 (Bacteria)와 다른 오염물질의 침투를 막아주어 상처보호에 용이합니다. 또한 습윤환경을 유지하여 흉터가 남지 않도록 도와주며, 빠른 상처치유가 되도록 환경을 유지합니다.

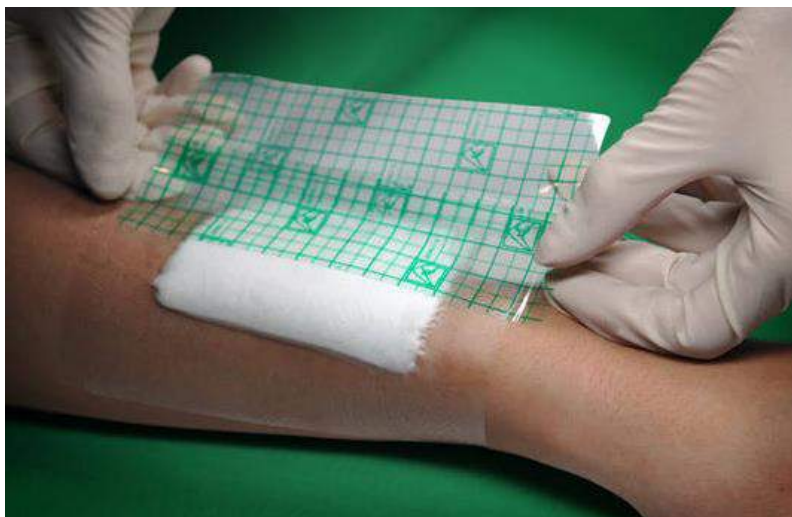

2. 저자극성 (Hypoallergenic)

저자극성 아크릴 접착제 사용으로 장기간 사용에도 피부자극이 적어 피부가 예민한 환자에게 적합한 제품입니다.



3. 유연성(Conformable)



지지체 필름의 유연성이 좋아 신체 어느 부위에도 부착이 용이하며, 높은 탄력으로 부착 시에도 움직임이 자유롭습니다.

4. 투명성(Transparent)

PU Film(폴리우레탄 필름) 커버 드레싱은 매우 얇고 투명하기 때문에 드레싱을 제거하지 않고도 삼출물의 양을 확인할 수 있습니다.



제품 사용 시 장점

1. 쉽고 간단하게 드레싱이 가능하여 간호사들의 드레싱 적용의 번거로움을 해결하여 업무의 효율성을 높일 수 있습니다.
2. 우수한 방수력으로 Securederm Film Roll을 부착하고도 가벼운 샤워를 할 수 있어 청결관리에도 효율적입니다.
3. 타사 대비 저렴한 가격으로 병원의 부담을 줄일 수 있습니다.

보관방법

실온보관, 직사광선과 과열을 피하십시오.